



Alensa

○ Viivain PD:n (pupillien etäisyyden) mittaamiseen

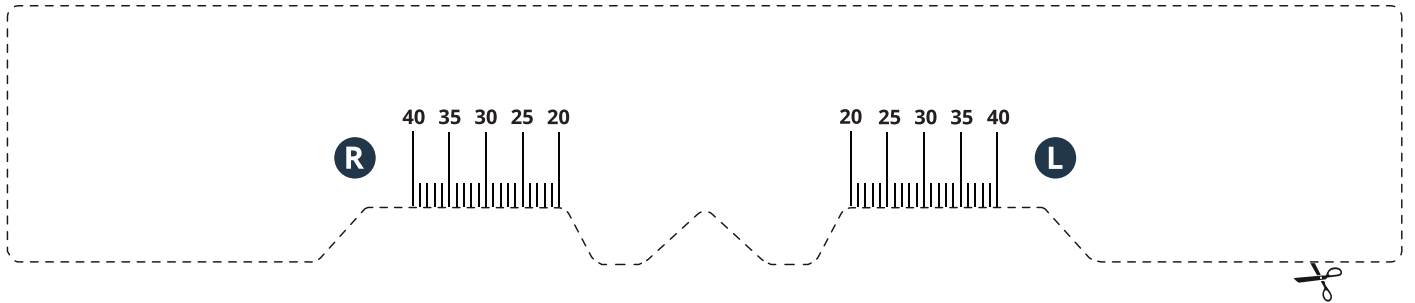

○ Kuinka käyttää tätä työkalua PD:n (pupillien etäisyyden) mittaamiseen

1. Tulosta tämä sivu todelliseen kokoon (valitse „oletus“ tulostusasetus tai poista kaikki skaalaus käytöstä).
2. Varmistaaksesi, että olet tulostanut tämän sivun oikein, tarkista, vastaako alla oleva viivaimen 1 senttimetri yhtä todellista senttimetriä.

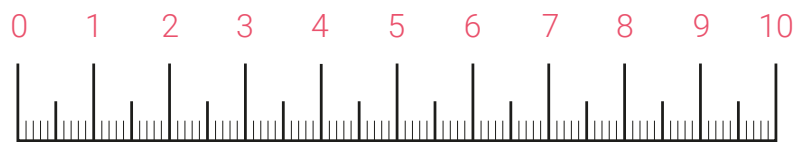

3. Leikkaa viivain jäljitysviivan mukaisesti.
4. Nyt voit mitata PD:n jollakin seuraavista tavoista: Aseta viivain nenänsillan päälle ikään kuin laittaisit silmälasit (kuten tämän sivun alareunassa on kuvattu). Jos olet yksin, seiso peilin edessä noin puolen metrin etäisyydellä. Katso suoraan eteenpäin, sulje vasen silmäsi ja merkitse oikean pupillin keskikohta (R) printattuun viivaimen. Toista tämä prosessi toisella silmälläsi. Mittaaminen on helpompaa jonkun toisen henkilön avulla. Pidä tässä tapauksessa viivainta paikallaan katsoessasi suoraan eteenpäin ja pyydä toista henkilöä merkitsemään molempien pupilliesi sijainti - oikea silmä (R) ja vasen silmä (L).
5. Voit nyt syöttää PD-arvosi tilauksellesi osoitteessa www.alensa.fi.

